

※同封の**使用説明書**も必ず目を通してください

使い方 (装着手順)

事前準備


- ★爪を直線にカットしてから装着(裏面参照)
- ★周囲を片付けてから装着(器具が、はじけ飛んでいて紛失しないように)

カーブ2か所(BとB')が爪の上になります



端は爪の下側


1

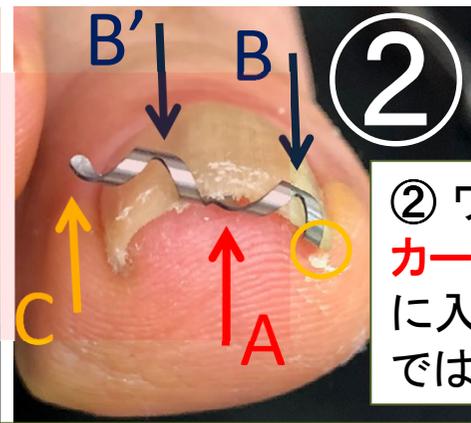

2

巻き爪・陥入爪
治療の相談室

② ワイヤー下部中央のカーブ部分(A)を爪の下に入れたところ(ここまでは比較的簡単です)

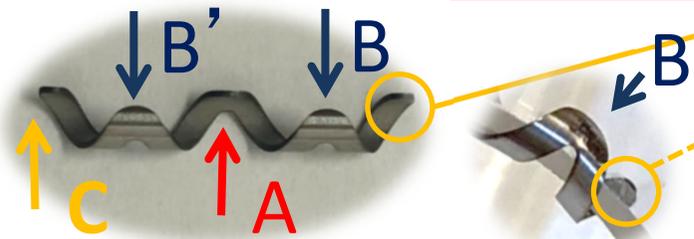

上側から見ながら装着する場合、この紙を逆にすると参考になります

参考図

① まず端(O)を爪の下側に入れます。(B)の部分を爪の上側に残しながら(A)の部分(部分)を爪の下に入れます。右利きの場合、向かって左側から入れる(逆端の右側を最後に右手で入れる)のがやりやすいですが、巻きが高度の場合、変形の強い側からの装着がしやすい場合もあります。

変形が強い場合や非対称の場合、ネイルエイドの位置は、そこまでこだわらなくても装着できれば効果があります。(頻回の操作は破損の原因となる場合があります)


破損した場合
交換保証あり
裏面参照

外す時は、引っかかりを順番に外す事を意識しながらゆっくり爪から外してください。無理に引っ張ると破損するのでご注意ください。



3

B'は常に爪の上側にある
Cを手前に引っ張り過ぎない
手でうまく押さえられない場合、
半分をテープで固定してから、
逆側を装着してみてください。

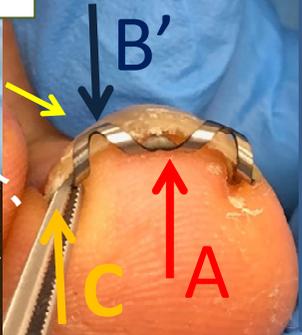

参考例
変形が強い爪



4



テープ保護
※紛失防止

③ ★ワイヤーの位置がずれないように押さえ★、(B')のカーブを爪の上側に残しながら、逆側の端(C)を爪の下側に入れ込みます。この反発力が矯正力になるので少しワイヤーに抵抗があります。★(B')を爪の下にいくほど曲げてしまうか、Cを手前に引っ張り過ぎると、Aで破損します。(B')が爪の上にあることを、常に意識して装着してください★(慣れるとコツがつかめます)

④ 装着したところ: 最後に器具を爪側に押し込み、爪としっかり密着させて下さい。紛失予防にはテープ保護が確実です。(裏面および使用説明書参照)

装着解説動画のご案内

付け方と外し方を詳しく解説した動画を作成しました。
是非参考にして頂ければと思います（一時停止しながら見てください）

巻き爪・陥入爪
治療の相談室



巻き爪・陥入爪治療の相談室
YouTubeチャンネル




ネイル・エイド
付け方と外し方の詳細
(購入者向け)

QRコードをご利用になれない方は、
YouTubeで「**ネイルエイド 付け方**」
または「**巻き爪相談室**」と検索してみ
てください。

外れやすい
場合の注意点

★爪の準備★ 装着前に爪をできるだけ直線にカットしてください

爪の先端形状がカーブになっている場合、器具の両端が密着しづらく**外れやすい**です。またその状
況で**無理に両端を密着させようとすると**、中央Aの部分に想定していない力が加わり**破損の原因**と
なります爪の先端をなるべく**直線にカット**してから装着してください。（右図参照）
裏面の④の密着も意識して下さい

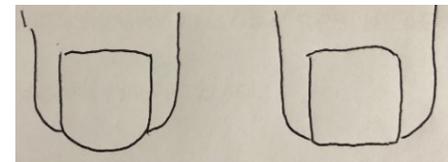

× ↑カーブ ○ ↑直線


商品保証のご案内

(**使い方に関わらず**破損した場合は交換します)
※紛失した場合は交換保証の対象外です **3か月以内**

商品保証：慣れない操作で破損してしまったなどの報告を受けています。破損などの商品
不具合がございましたら、**購入後3ヶ月以内であれば同商品との交換対応**をさせていただきます。
破損した商品を保管のうえ当店までご連絡ください。その他トラブルについてもご遠慮なく
ご相談ください。どうしても**装着が難しい場合は返品返金なども相談**させていただきます。（お
使いのメールアドレスや設定によっては当店からのメールを受け取れない場合があります。
**注文履歴や商品ページの、問い合わせフォームから連絡下さい。★★私からの返事は問
合わせフォームで確認できます★★**）

※紛失した場合は交換保証対象外となります。ご了承下さい。

Amazonでの連絡方法：購入頂いた商品ページの[**カートに入れる（今
すぐ買う）**]ボタンの下部に「この商品は、**巻き爪・陥入爪治療の相談
室**が販売・・・」とあるのでこの「**巻き爪・陥入爪治療の相談室**」の部
分をクリックしてください。次のページに「**質問する**」というボタンが
あります、そちらからご連絡下さい。

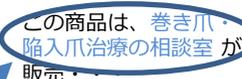

紛失対策



爪の先端全体を、器具も含めてテー
プで保護したり、指をネット包帯で
保護すると紛失予防になります。別
紙の**使用説明書「紛失について」**も
ご覧ください。

主な取り扱いECモール

Yahooショッピング 楽天市場 amazon

医療機関・治療院・サロン等への
卸販売はメールでご連絡下さい

tume.treatment@gmail.com